


DÉSINFECTER LES DISPOSITIFS PARTAGÉS

Comment s'y prendre?

- Laver ses mains
- Mettre le dispositif dans un sac Ziploc
- Essuyer le sac Ziploc avec une lingette Accel Intervention
- Laisser sécher pendant 1 minute
- Retirer le dispositif électronique du sac et jeter ce dernier

Dispositif électronique :

- Essorer l'excédent de liquide des lingettes avant de nettoyer et de désinfecter le dispositif
- Essuyer les surfaces avec une lingette Accel
- Laisser sécher les surfaces pendant 1 minute pour les lingettes INTERVENTION et 3 minutes pour les lingettes PREVENTION
- Sécher avec un chiffon

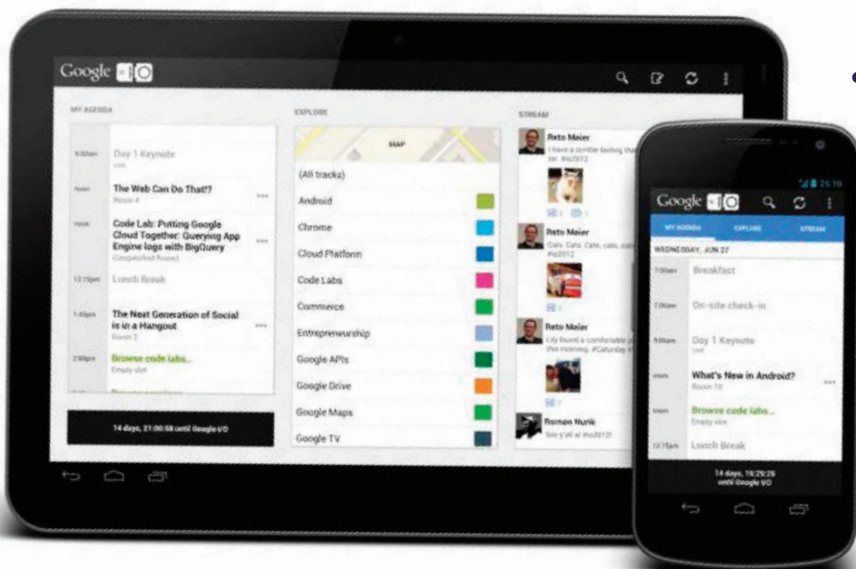

Merci de protéger les patients